

ottobock.

Quickstart AeroLink System

Quality for life




DE Vorbereitung für den Gipsabdruck

EN Preparing for the plaster cast


ES Preparación para la impresión en yeso

PT Preparação para o molde de gesso


FR Préparation des empreintes en plâtre

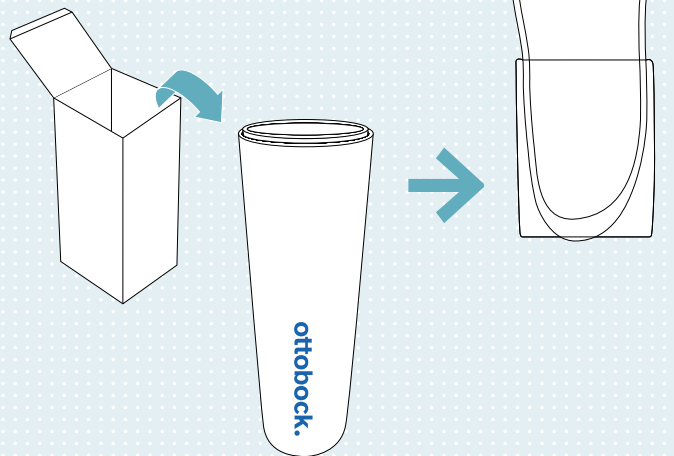


- DE** Vorbereitung für den Gipsabdruck
- EN** Preparing for the plaster cast
- ES** Preparación para la impresión en yeso
- PT** Preparação para o molde de gesso
- FR** Préparation des empreintes en plâtre

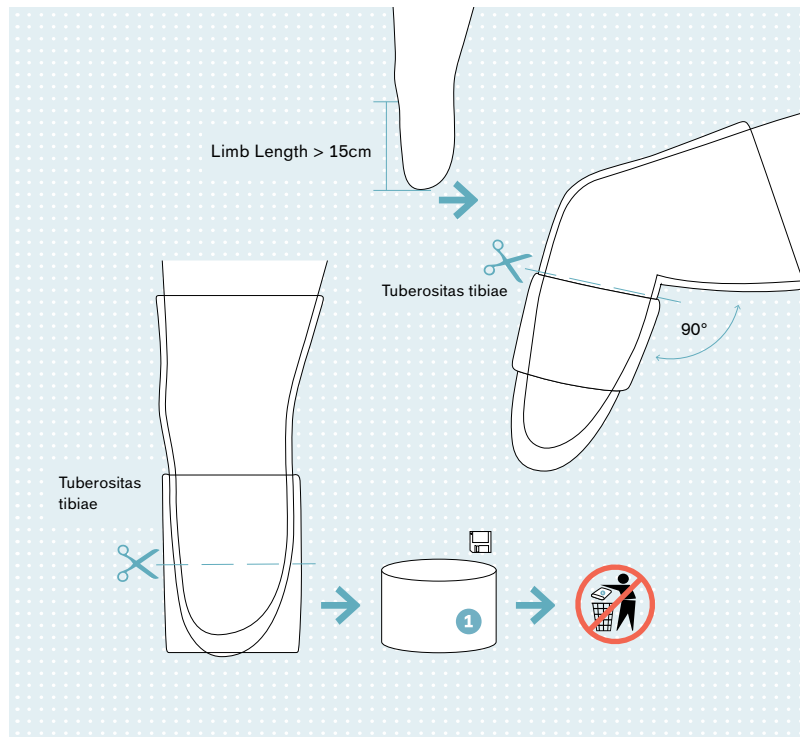


- DE** Herstellung des Gipsmodells
(Vollbelastungsschaft)
- EN** Fabricating the plaster model
(full weight bearing socket)
- ES** Elaboración del molde de escayola
(encaje de carga plena)
- PT** Confecção do modelo em gesso
(encaixe de carga completa)
- FR** Fabrication du modèle en plâtre
(emboîture pleine charge)

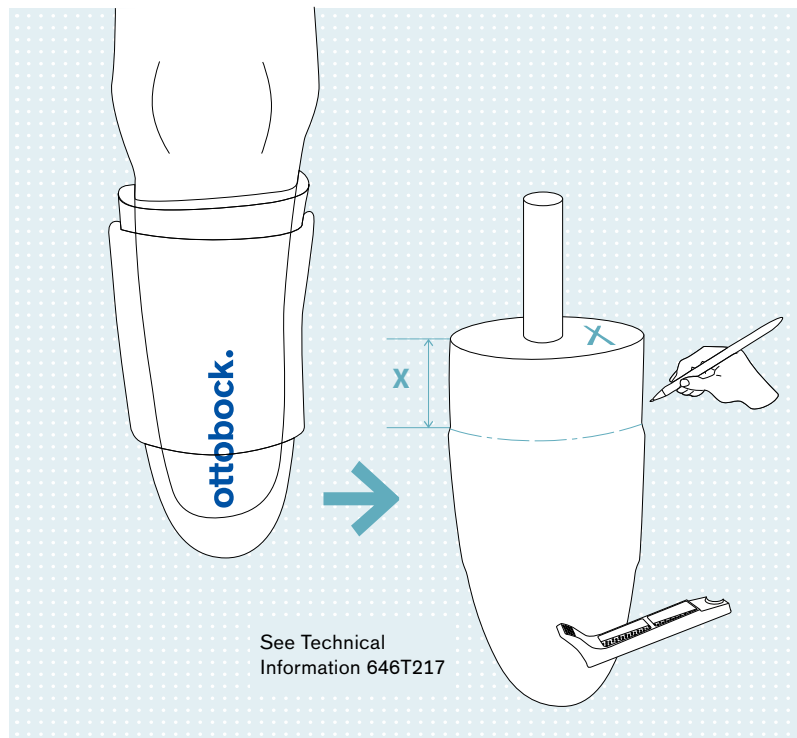

- DE** Herstellung des Gipsmodells
(Vollbelastungsschaft)
- EN** Fabricating the plaster model
(full weight bearing socket)
- ES** Elaboración del molde de escayola
(encaje de carga plena)
- PT** Confeção do modelo em gesso
(encaixe de carga completa)
- FR** Fabrication du modèle en plâtre
(emboîture pleine charge)

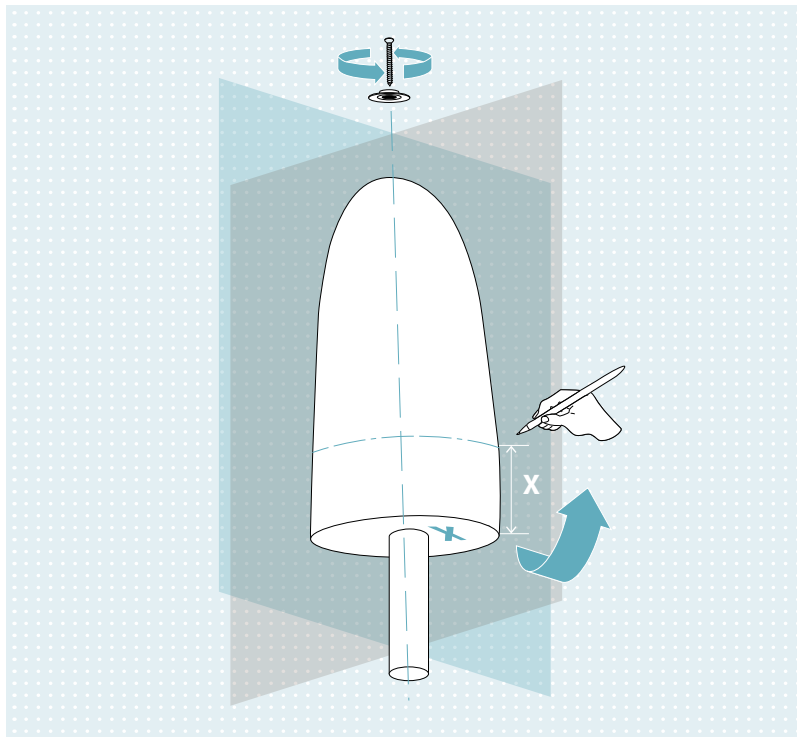

- DE** Herstellung des flexiblen
Innenschaftes
- EN** Fabricating the flexible
inner socket
- ES** Elaboración del encaje
interior flexible
- PT** Confecção do encaixe
interior flexível
- FR** Fabrication de l'emboîture
interne flexible

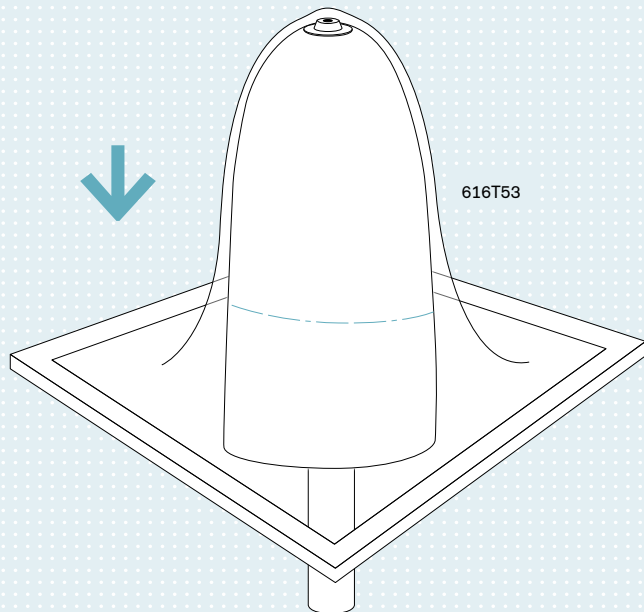


DE Herstellung des flexiblen
Innenschaftes

EN Fabricating the flexible
inner socket


ES Elaboración del encaje
interior flexible

PT Confeção do encaixe
interior flexível

FR Fabrication de l'emboîture
interne flexible

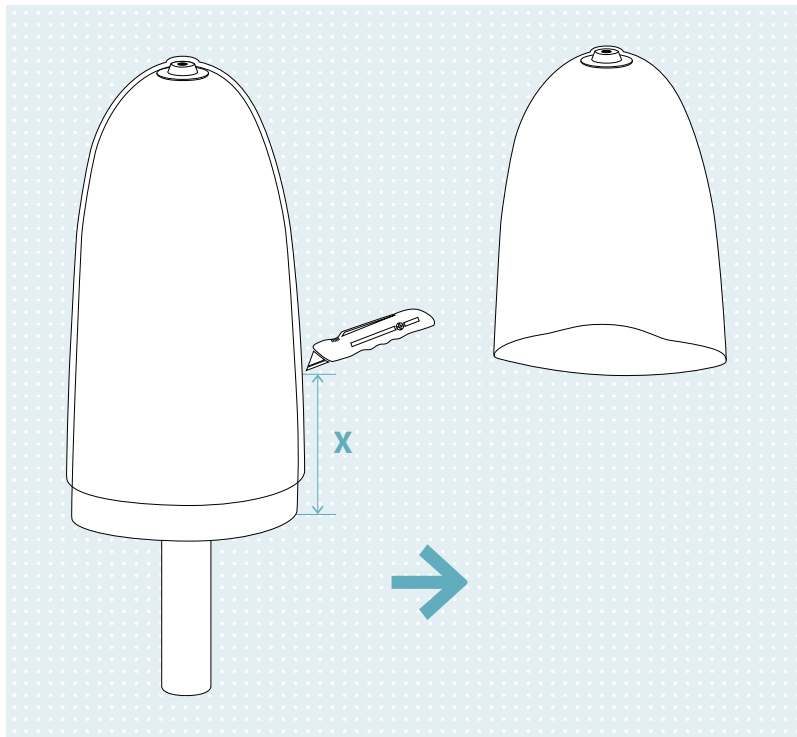

- DE** Herstellung des flexiblen
Innenschaftes
- EN** Fabricating the flexible
inner socket
- ES** Elaboración del encaje
interior flexible
- PT** Confecção do encaixe
interior flexível
- FR** Fabrication de l'emboîture
interne flexible

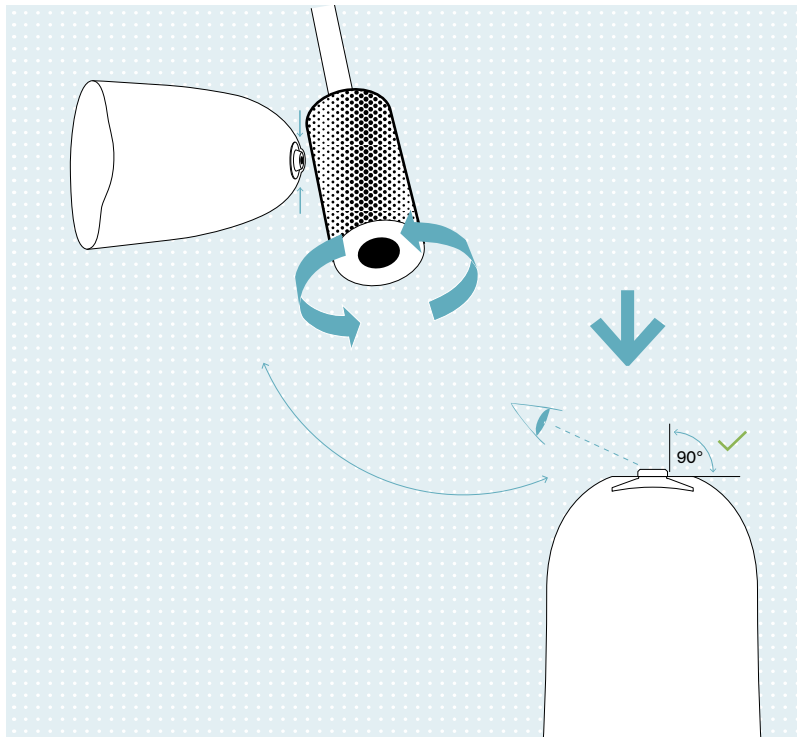


DE Herstellung des flexiblen
Innenschaftes

EN Fabricating the flexible
inner socket


ES Elaboración del encaje
interior flexible


PT Confecção do encaixe
interior flexível

FR Fabrication de l'emboîture
interne flexible

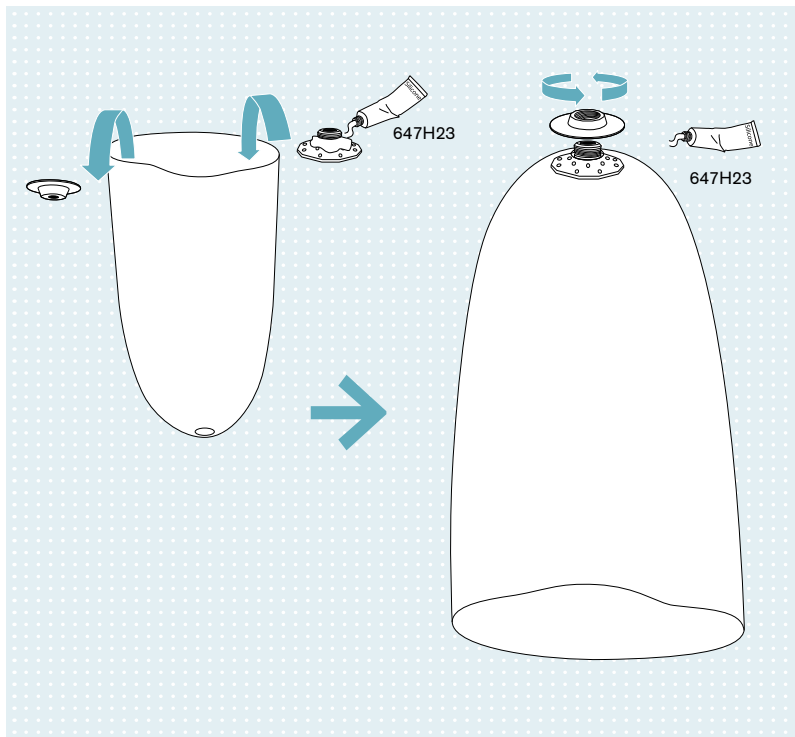


- DE** Herstellung des Außenschaftes –
Vorbereiten des Innenschaftes
- EN** Fabricating the outer socket –
preparing the inner socket
- ES** Elaboración del encaje exterior –
Preparación del encaje interior
- PT** Confeção do encaixe exterior –
Preparação do encaixe interior
- FR** Fabrication de l'emboîture externe –
Préparation de l'emboîture interne

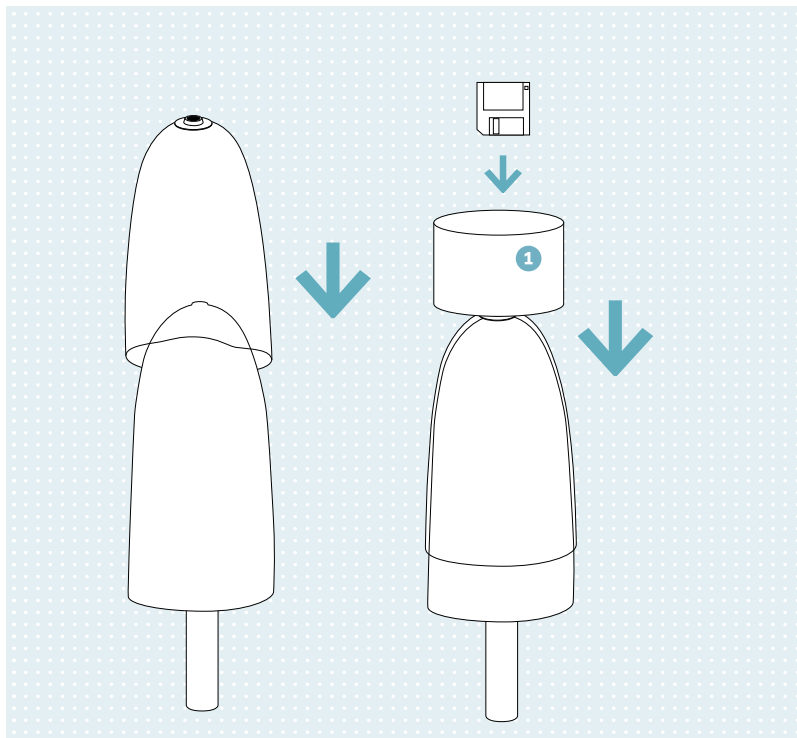


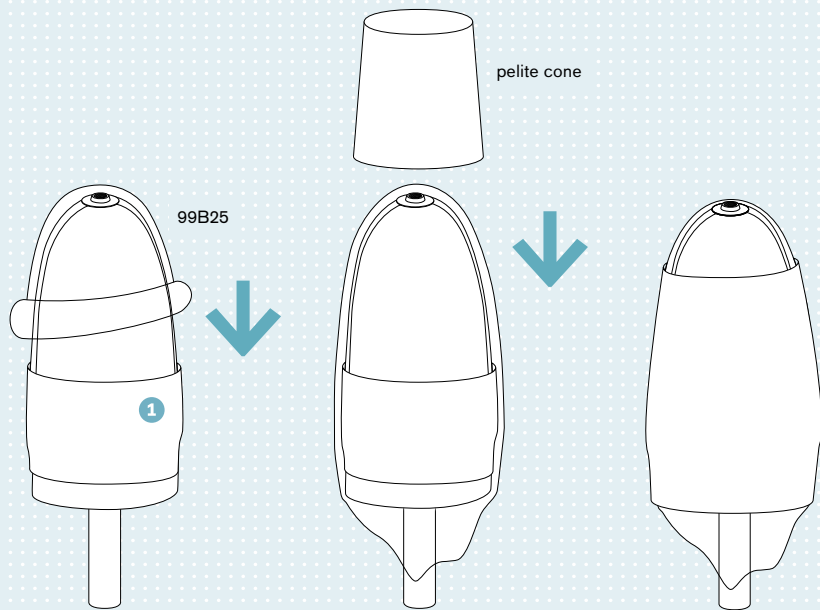


- DE** Herstellung des Außenschaftes –
Laminieren des Außenschaftes
- EN** Fabricating the outer socket –
laminating the outer socket
- ES** Elaboración del encaje exterior –
Laminación del encaje exterior
- PT** Confeção do encaixe exterior –
Laminação do encaixe exterior
- FR** Fabrication de l'emboîture externe –
Stratification de l'emboîture externe

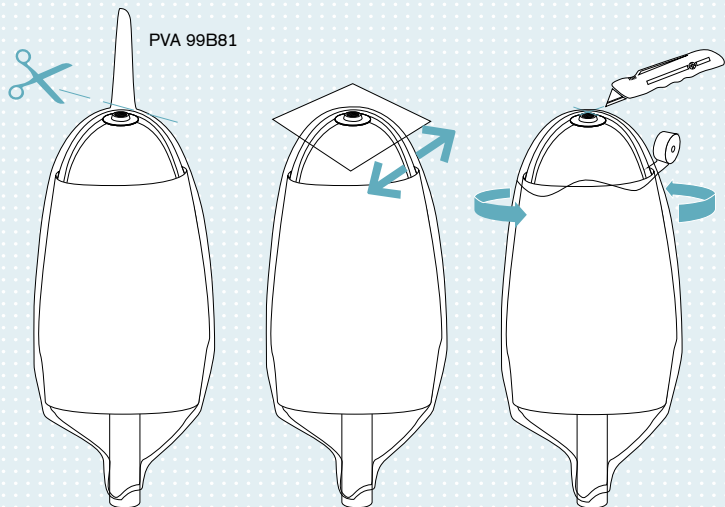

- DE** Herstellung des Außenschaftes –
Laminieren des Außenschaftes
- EN** Fabricating the outer socket –
laminating the outer socket
- ES** Elaboración del encaje exterior –
Laminación del encaje exterior
- PT** Confeção do encaixe exterior –
Laminação do encaixe exterior
- FR** Fabrication de l'emboîture externe –
Stratification de l'emboîture externe

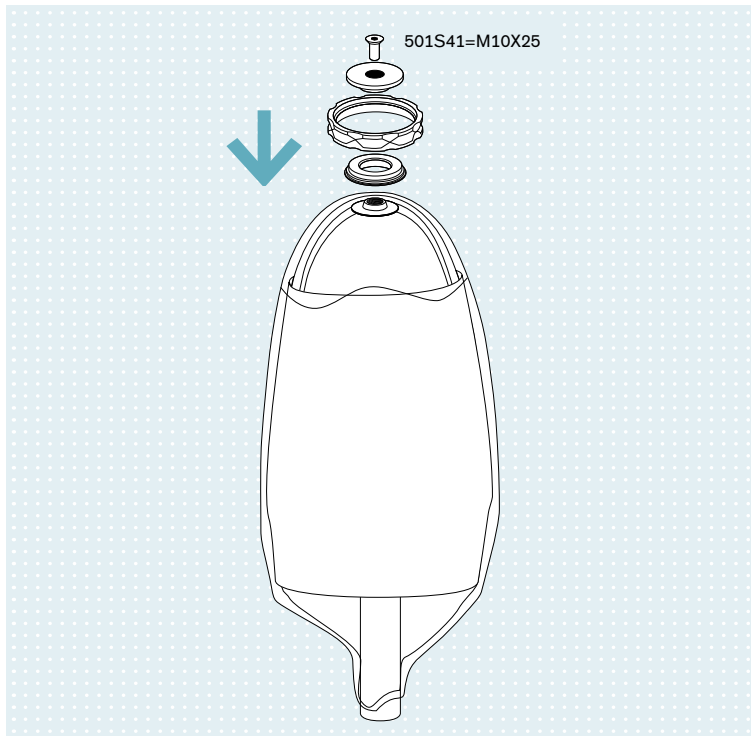

- DE** Herstellung des Außenschaftes –
Laminieren des Außenschaftes
- EN** Fabricating the outer socket –
laminating the outer socket
- ES** Confeção do encaixe exterior –
Laminação do encaixe exterior
- PT** Elaboración del encaje exterior –
Laminación del encaje exterior
- FR** Fabrication de l'emboîture externe –
Stratification de l'emboîture externe

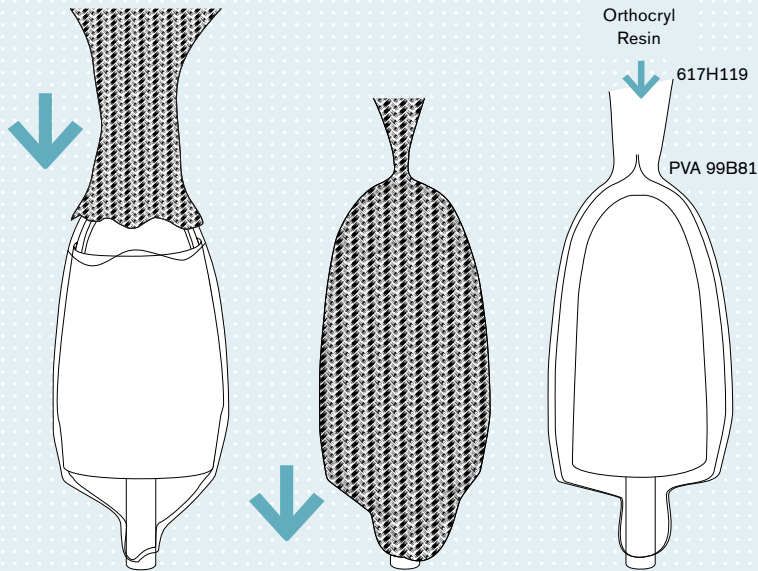

Ohne Abbildung:
Kontur des
Außenschaftes
anzeichnen und
zuschneiden.

Not illustrated:
Marking and
trimming the
contour of the
outer socket.

Sem ilustração:
Delinear o
contorno do
encaixe exterior
e recortar.

Sin imagen:
Dibuje y corte
el contorno del
encaje exterior.

Non illustré :
Repérer et
découper les
contours de
l'emboîture externe.



Otto Bock HealthCare GmbH
Max-Näder-Straße 15 · 37115 Duderstadt/Germany
T +49 5527 848-0 · F +49 5527-848 1524
export@ottobock.de · www.ottobock.com